

# LED-ZZ03

## Стоматологический светильник

### Инструкция по эксплуатации

3. В автоматическом режиме включением и яркостью светильника нужно управлять с помощью бесконтактного сенсора. Расположите руку под сенсорным переключателем (<10 см), слегка проведите рукой, чтобы включить или выключить свет. При включенном свете остановите руку под переключателем - светильник начнет настраивать яркость. Уберите руку, чтобы прекратить настройку.

4. Используйте кнопки +/- (ручной режим) или сенсор (автоматический режим) для увеличения/уменьшения яркости. Установленное значение яркости будет сохраняться при следующем включении.

5. Клавиша К - настройка цветовой температуры, касайтесь этой кнопки, чтобы выбрать один из 3 режимов цветовой температуры.

6. Светильник может свободно и гибко вращаться в трех осях. Положение светильника легко регулируется движением рукоятки. Открутите и снимите фиксирующий винт, чтобы снять рукоятку для выполнения стерилизации.

#### Очистка и дезинфекция

Внимание: не используйте растворители и агрессивные химикаты! Не используйте щелочные средства!


Внешнюю поверхность светильника можно очищать и дезинфицировать нейтральным дезсредством (например, Neutral Q 64).

Процедура очистки и дезинфекции

Очистите светильник, стекло, или прозрачное покрытие и зеркало мягкой безворсовой тканью, смоченной теплой водой.

Протрите светильник и рукоятки дезинфицирующим средством.

Кожухи рукояток можно снять и простерилизовать (темп. не более 120).

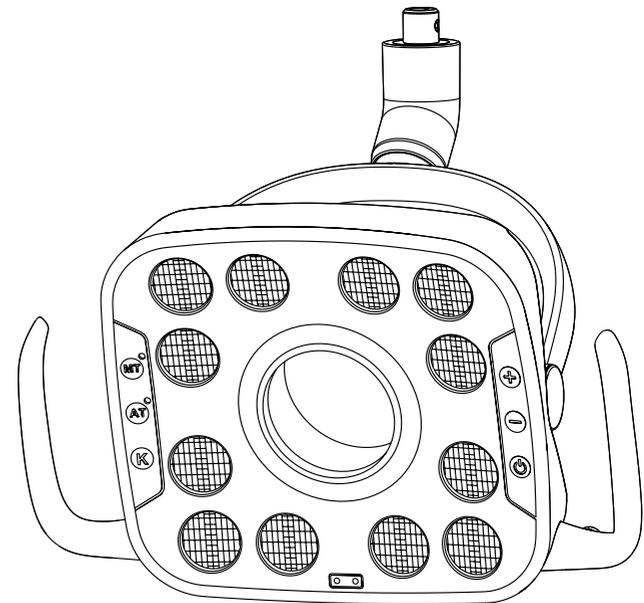


Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию


## Область применения

Продукт используется в стоматологических кабинетах для освещения полости рта пациента.

## Конструкция светильника

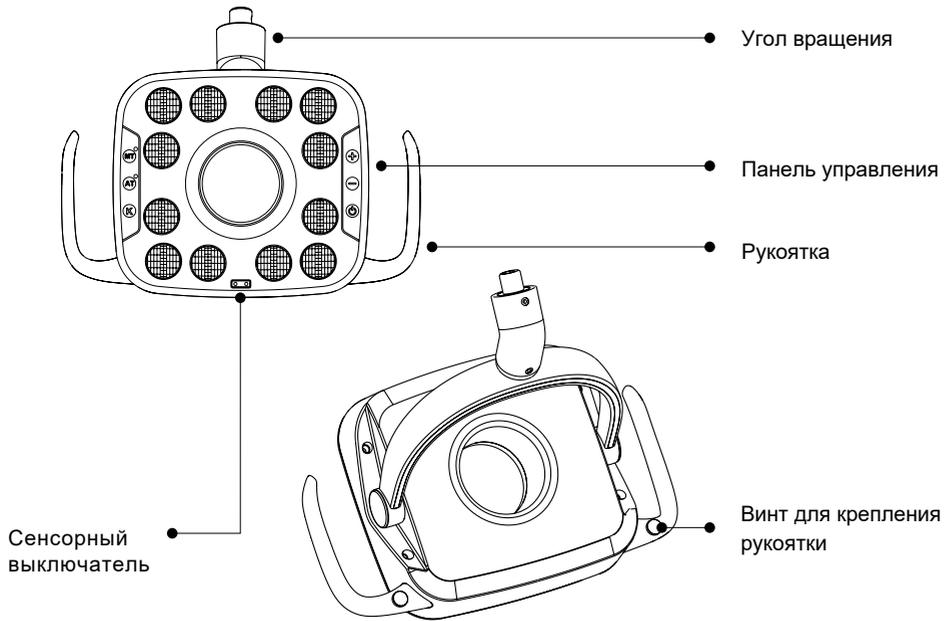

## Монтаж

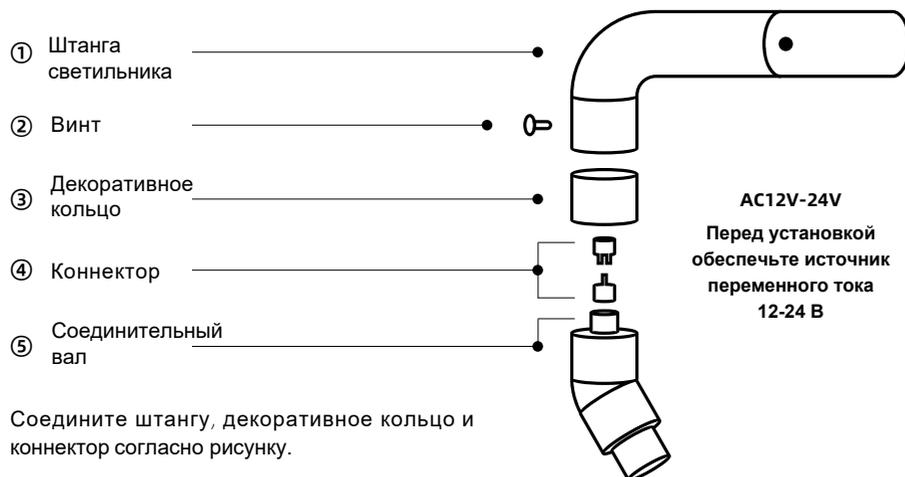

Соедините штангу, декоративное кольцо и коннектор согласно рисунку.

## Условия среды

### Рабочие условия

Температура воздуха	5°C - +40°C
Относительная влажность	30% - 85%
Атмосферное давление	70 - 106 кПа


### Условия транспортировки и хранения

Температура среды	-40°C - +70°C
Относительная влажность	10% - 95%
Атмосферное давление	50 - 106 кПа

## Технические параметры

Входное напряжение	Переменный ток 12-24 В
Мощность	36 ВА
Освещенность	7000 - 100 000 люкс
Цветовая температура	4000-5700 К
Бестеновой эффект	≤ Ф 1 мм
Индекс цветопередачи	Ra >90%
Масса-нетто	2070 г
Масса-брутто	2900 г

## Инструкции по эксплуатации

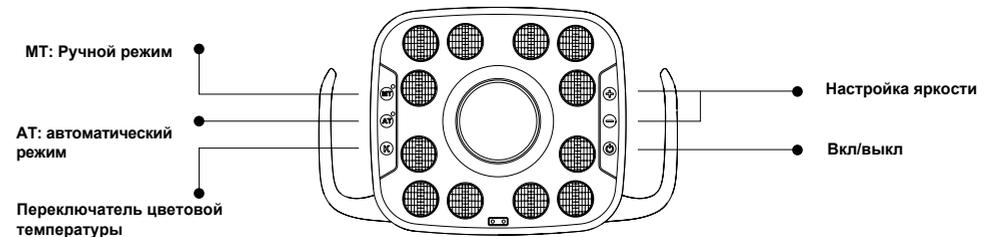

1. Касанием кнопок MT/AT можно переключаться между MT (ручным) и AT (автоматическим) режимами (обозначены индикатором).

2. В ручном режиме работы MT сенсорный переключатель не работает. Для включения/выключения воспользуйтесь кнопкой выключателя, яркость регулируйте клавишами "+" и "-".