


25-07-2025 08:00:10 FRI

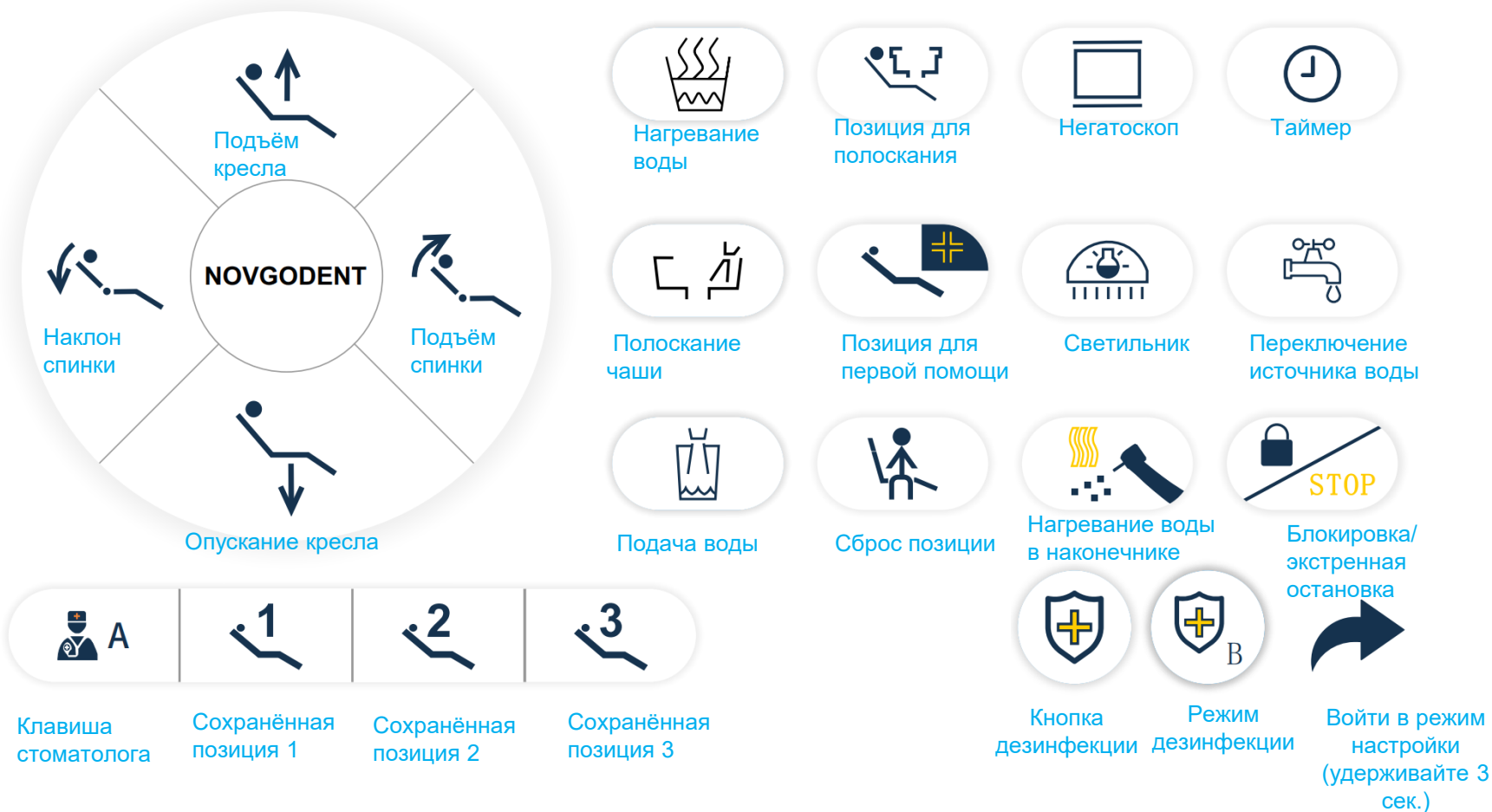

25-07-2025 08:00:10 FRI

Системные настройки



Общие настройки



Подача воды в
стакан/
плевательницу



Выбор
источника воды



Настройки
подкатного блока



Настройки памяти



Настройки
ограничений



Нагрев
наконечника
вкл/выкл



Защитная
блокировка от
детей вкл/выкл



Настройки
дезинфекции



Дата/время



Микромотор
вкл/выкл




Скейлер
вкл/выкл

Настройки положения
инструмента

1 2 3 4 5 6

A B

Многофункциональные
кнопки педали A и B

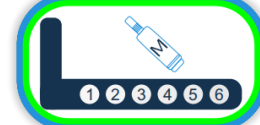

Нажмите чтобы
выбрать режим одного
мотора или двух
моторов



Кнопка возврата

Дважды быстро нажмите эту
кнопку, чтобы вернуться в
главное меню

Главное меню сенсорного дисплея M8

Удерживайте 3 сек,
чтобы войти в
интерфейс настройки



Общие настройки



25-07-2025 08:00:10 FRI

Общие настройки

Сигнальное
устройство



Вкл/выкл

Яркость



Настройка яркости

Язык



English

Русский

Возврат



Главное меню сенсорного дисплея M8

Удерживайте 3 сек.,
чтобы открыть
настройку подачи воды



Подача воды в
стакан/
плевательницу



25-07-2025 08:00:10 FRI

Подача воды в стакан/плевательницу

Время наполнения

стакана
Секунды:

Время подачи
воды

5с

Удерживайте, чтобы
настроить время
подачи воды

Длительное
Нажатие

(Удерживайте кнопку нажатой, пока вода в
бумажном стакане не достигнет подходящего
уровня, это автоматически записывается)

Время
ополаскивания
чаши

3 мин

5 мин

15 с

В обычном
состоянии
открыто


Настройка времени
промывки



Возврат

Главное меню сенсорного дисплея M8

Нажмите и удерживайте 3 с, чтобы открыть настройку сохраняемых положений

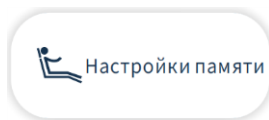

Открыв меню настройки сохраняемых положений:

1. Выберите врача для настройки позиции
2. Установите необходимую высоту сиденья и спинки
3. Выберите ячейку для сохранения текущей позиции

25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройки памяти



Сохранить текущее положение кресла в

Врач А

Врач В

Врач С

Выберите врача, для которого нужно настроить позиции

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Выберите ячейку сохранения

Возврат

Главное меню сенсорного экрана M8

Нажмите и удерживайте 3 с,
чтобы открыть настройку
крайних положений




Настройки
ограничений

Нажмите Automatic Setup:

1. Кресло автоматически перейдет в крайнее нижнее и крайнее верхнее положения, удалит все предыдущие настройки и вернётся к заводским настройкам
2. Завершив настройку, программа автоматически закроет меню

25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройки ограничений

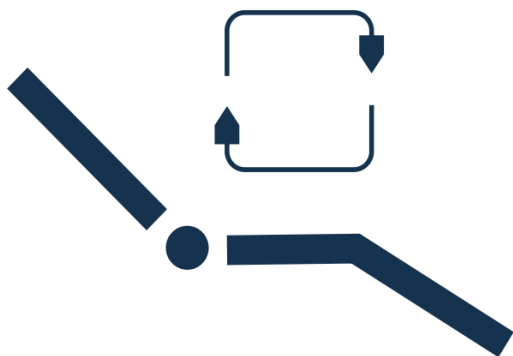

Нажмите кнопку "Auto Setup",
устройство автоматически выполнит
настройку.

Нажмите для запуска
инициализации

Автоконфигурация



Возврат

Главное меню сенсорного экрана M8

Удерживайте 3 сек, чтобы
открыть настройку даты



Дата/время



Открыв интерфейс настройки даты/времени,
пролистывайте вверх или вниз, чтобы установить
время/дату.

Завершив настройку, нажмите клавишу возврата,
чтобы закрыть меню настройки.

25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройка даты/времени

2021	1	13
2022	2	14
2023 год	3 месяц	15 день
2024	4	16
2025	5	17

1	1	13
2	2	14
3 ч	3 мин	15 с
4	4	16
5	5	17



Возврат

Главное меню сенсорного дисплея M8

Нажмите и удерживайте 3 сек., чтобы войти в настройку дезинфекции



Настройки дезинфекции

Режим дезинфекции установлен производителем, повторять настройку не нужно. Выберите режим дезинфекции в зависимости от конфигурации стом. установки:



25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройки дезинфекции



Режим дезинфектора

1. Дезинфекция с озонированием: поддерживается только если стом. установка оборудована дезинфектором.



Режим дезинфицирующего сред

2. Режим дезинфицирующего средства (стандартный): для дезинфекции используйте хлорноватистую кислоту



Режим без дезинфекции

3. Режим без дезинфекции: если выбрать его, на дисплее не будет кнопки дезинфекции

Нажмите для выбора режима дезинфекции



Возврат



Шаг 1: Подготовка к дезинфекции:


1. Наполните бутылки (см. отметки рядом с бутылками) чистой водой и дезинфицирующим средством в пропорции 1:8 (1 часть дез. средства к 8 частям воды).
2. На блоке врача снимите пистолет, наконечник и ручной блок скейлера.
3. На блоке ассистента снимите пистолет, эжекторы слюноотсоса и пылесоса.
4. Положите дезинфекционную форму на чашу плевательницы, так чтобы патрубок находился под краном подачи воды для полоскания рта.
5. Вставьте следующие инструменты в посадочные места:
 - Вставьте пистолет в гнездо с зажимом и закрепите его.
 - Откройте клапан для эжекторов пылесоса и слюноотсоса в позициях около головы шланга
 - Установите стальные коннекторы турбинных наконечников и скейлера в оставшиеся гнезда.
6. Откройте регуляторы потока воды на максимум (находятся с правой стороны стола врача).

Главный интерфейс сенсорного экрана М8

25-07-2025 08:00:10 FRI



Нажмите, чтобы
запустить
дезинфекцию

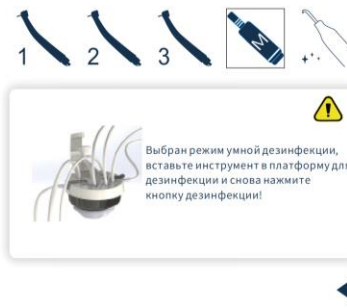

Шаг 2: войти в режим ожидания дезинфекции:

1. Выберите режим дезинфекции А или В
2. Нажмите на кнопку дезинфекции, чтобы перейти в интерфейс дезинфекции одной клавишей.


Автоматическая дезинфекция одной клавишей М8

Принцип работы	Режим дезинфекции	Процедура дезинфекции
1. С 2 шт. 3л бутылками воды: ①одна для дезинфицирующего раствора, используемого в процессе дезинфекции ②одна для чистой воды, используемой в блоке врача, блоке ассистента и для полоскания рта 2. Общее число операций дезинфекции записывается, отчёт можно выгрузить на SD карту. 3. После дезинфекции стом. установка переходит в режим ожидания. Если в течение 1 часа действий нет, переключатели воды, воздуха и электричества автоматически выключаются.	Режим А 8+1 мин (обычная дезинфекция)	1. Промывка труб чистой водой--1 мин 2. Промывка труб дез. средством--2 мин 3. Выдержка дез. Средства в трубах--3 мин 3. Полоскание труб водой -1 мин +30 с 4. Сушка труб воздухом –1мин +30 с
	Режим В 21+1 мин (глубокая дезинфекция)	Удерживайте кнопку дезинфекции 3 с, чтобы войти в режим В 1. Промывка труб чистой водой --1 мин 2. Промывка труб дез. средством --2 мин 3. выдержка дез. средства в трубах -15 мин 3. Полоскание труб водой --2 мин +30 с 4. Сушка труб воздухом –1 мин +30 с

Главное меню сенсорного дисплея M8



25-07-2025 08:00:10 FRI

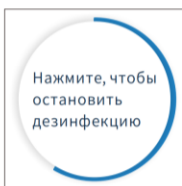


Общее время: мин

Осталось: :

Дата последней дезинфекции: - -



25-07-2025 08:00:10 FRI

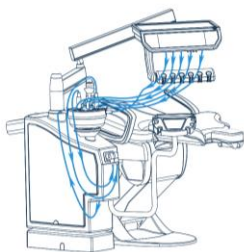

Опорожнение труб

Общее время: 1 мин

Осталось: с

По завершении дезинфекции водопроводная система установки автоматически высушивается для предотвращения роста бактерий.



Сушка воздухом для удаления влаги из труб

Шаг 3: запуск дезинфекции:

1. Нажмите круглую кнопку на сенсорном дисплее, подписанную "Press to start disinfection"

2. Когда дезинфекция автоматически завершится, удалите все тубинги из держателя и верните их на места.

3. Благодаря конструкции самозащиты нагревателя стакана в гидроблоке, после сушки воздухом нагреватель стакана сохраняет небольшое количество дез. средства в емкости.

Рекомендуем использовать 2 стакана воды, чтобы разбавить оставшееся дез. средство в нагревателе стакана.

Главное меню сенсорного дисплея M8

Переключение
источника воды



2 PM on Monday, February 13th, 2023.

РуссКаЯ ВерСНЯ



Бутылка для
чистой воды



Бутылка для
дезинфицир
ующего сред
ства

— Режим чистой водой:

1. Когда бутылка с чистой водой  пуста и подается сигнал тревоги, немедленно наполните соответствующую бутылку чистой водой.
2. Добавив воды, нажмите  , чтобы перейти в режим работы с чистой водой.
3. нажмите  , чтобы переключиться в режим водопроводной воды.

Режим дезинфекции:

1. Когда бутылка с чистой водой  пуста и подается сигнал тревоги, немедленно наполните соответствующую бутылку чистой водой.
2. Добавив воды, нажмите  , чтобы войти в режим дезинфекции.
3. Когда бутылка с чистой водой  пуста и подается сигнал тревоги, немедленно наполните бутылку с водой дезинфицирующим средством.
4. Добавив воды, нажмите  , чтобы войти в режим дезинфекции.
5. нажмите  , чтобы выйти из дезинфекции.

Главное меню сенсорного дисплея M8+

Когда вы берёте наконечник,
дисплей показывает следующее



25-07-2025 08:00:10 FRI


Динамическое оборудование - наконечник 1

Высокоскоростной турбинный наконечник



Давление воздуха в
наконечнике, кПа
кПа

Рабочее давление
наконечника

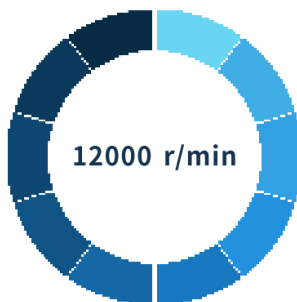

Скорость наконечника

Скорость наконечника

Позиция инструмента

1

2

3

4

5

6



Кнопки для процедур


Главное меню сенсорного дисплея M8

Когда вы берёте скейлер,
дисплей показывает следующее



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Зубной скейлер

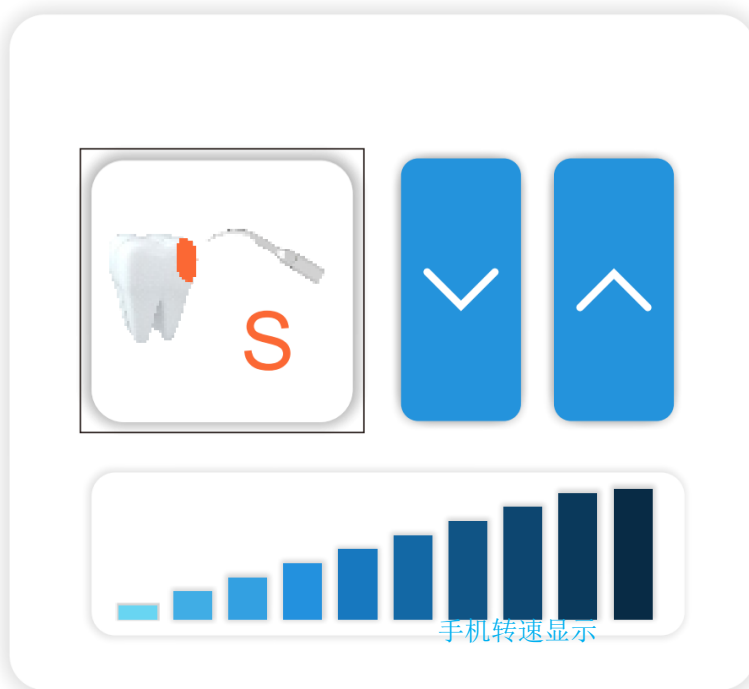

Позиция инструмента

1

2

3

4

5

6



Treatment buttons



Главное меню сенсорного дисплея M8



Выбор режима скейлера



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Зубной скейлер



Позиция инструмента 5

I

II

III



Главное меню сенсорного дисплея M8

Когда вы берёте микромотор,
дисплей показывает следующее



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Электромоторы

Электромоторы Electric motor mode selection

М1 М2 М3 М4

Понизить обороты

200000 RPM

Повысить обороты

Выбор передаточного числа

1:1 1:5 16:1 20:1

Реверс Вперед Свет

Обратное вращение По часовой стрелке Свет вкл/выкл

Скорость электромотора

Позиция инструмента 4

Кнопки для процедур



Главное меню сенсорного дисплея M8



Выбор бренда микромотора



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Электромоторы

Электромоторы

M1 M2 M3

✓ 200000 RPM ^

1:1 1:5 16:1 20:1

Реверс Вперед Свет

Позиция инструмента 6

DS

BA

JM

SH

DT

