

Инструкция на светильник ДИОДНЫЙ

Внимание: Гарантия будет действовать только при соблюдении правил ниже.

- (1) Следуйте указаниям в инструкции.
- (2) Используйте изделие только по назначению.
- (3) Убедитесь, что питание подключено правильно, поломки связанные с перебоем питания, коротким замыканиям в сети не подлежат гарантийной замене.
- (4) Убедитесь, что светильник закреплен надежно, механические поломки не подлежат гарантийной замене.
- (5) Лучше всего, если установкой и обслуживанием светильника будет заниматься квалифицированный медицинский техник.
- (6) Используйте только оригинальные запасные части по запросу у дистрибьютора.

I. Описание

1. Назначение

Используется только вместе со стоматологической установкой в целях диагностики.

1. Общая информация

Компоненты светильника показаны ниже:



- 1) —Ручка 2) —Ручка 3) —Линза 4) —Кнопка вкл/выкл
 5) —Окно индукции 6) —Дисплей 7) —Тач скрин для управления температурой
 8) — Тач скрин для управления освещением 9) — Пантограф

2. Требования окружающей среды

Хранение:

Температура: -20°C — -70°C

Влажность: 10% — 90%

Использование:

Температура: 5°C— 45°C

Влажность: 10% — 90%

Атмосферное давление: 500 — 1060 гПа

3. Спецификация:

Вес: 4,8кг

Напряжение на входе : 12-24 В переменного тока

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 38 Вт

Освещение: 30000—90000 LUX

Температура цвета: 4000 К-5500К

Размер пятна: Ø120мм (при дистанции 900мм)

II. Работа

1. Углы ручек можно настроить как на рисунке ниже:



2. Управление:

1) Открыть или закрыть сенсором:

Для управления вкл/выкл белого света проведите от сенсора на расстоянии 10-30 мм рукой, один гудок означает закрыть, два гудка означает открыто.

2) Открыть или закрыть кнопкой:

Для управления вкл/выкл белого света нажатием кнопки, один гудок означает закрыть, два гудка означает открыто.

3) Управление температурой:



Уменьшать или увеличивать температура цвета можно через тач дисплей,8

уровней температуры в диапазоне 4000К-5500К.

4) Управление освещением:



Уменьшать или увеличивать уровень освещения можно через тач дисплей, 8 уровней освещения в диапазоне 30000-90000 люкс.

III. Чистка и стерилизация

Прозрачные линзы можно протирать специальной бумагой для линз, обычной бумагой или тряпкой вы можете повредить покрытие. Сами диоды чистить НЕЛЬЗЯ.

Ручки можно протирать дезраствором.

IV. Установка:

1. Инструкция по установке

Подсоедините плагер светильника к установке, затяните пантограф болтом М5, затем подсоедините питание установки 12-24 В переменного тока.

2. Схематическое изображение платы

